

KEXIM

IMPLANTAT- EXTRAKTIONS- SYSTEM



DIE LÖSUNG FÜR DIE AUFBEREITUNG VON IMPLANTATEN

Ob aufgrund biologischer oder mechanischer Ursachen, **die Entfernung eines Implantats ist eine Herausforderung für Implantologie-Experten**, insbesondere, wenn das Ziel dabei ist, so viel Knochen wie möglich zu erhalten, um eine sofortige Nachimplantation durchführen zu können.

KEXIM ermöglicht eine schnelle und atraumatische Entfernung von Implantaten mit einer hohen Vorhersagbarkeit.

ATRAUMATISCHES SYSTEM

KEXIM bietet einen maximalen Schutz des Knochens bei Implantatentfernungen⁽²⁾.

Das minimalinvasive Verfahren ermöglicht in vielen Fällen das Einsetzen von Implantaten direkt nach der Explantation, wodurch dem Patienten die Wartezeit und Kosten für eine Folgeoperation erspart werden.

Studien belegen eine Erfolgsquote von 98,4 % bei Explantationen, die mit KEXIM durchgeführt wurden⁽¹⁾



⁽¹⁾ Anitua E, Fernandez-de-Retana S, Alkhraisat MH. Performance of the counter-torque technique in the explantation of nonmobile dental implants. *Int J Implant Dent.* 2020 Jan 9;6(1):1. doi: 10.1186/s40729-019-0197-z.

⁽²⁾ Anitua E, Orive G. A new approach for atraumatic implant explantation and immediate implant installation. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol.* 2012 Mar;113(3):e19-25. doi: 10.1016/j.tripleo.2011.06.035.

kim

KOMPONENTEN DES KITS



DREHMOMENTRATSCH

Ermöglicht das einfache Lösen der Verbindung zwischen Knochen und Implantat bis zu einem Maximum von 200 Ncm.



EINWEG-EXTRAKTOREN

Extraktoren unterschiedlicher Breiten und Längen, die an die verschiedenen auf dem Markt erhältlichen Implantate angepasst werden können.



BOHRER

Bohrer zur Erweiterung einer Innenverbindung, um den Halt eines Extraktors in einem mechanisch stabileren Bereich zu ermöglichen.



MDPT1

Handgriff für Extraktoren.

RATSCHENVERLÄNGERUNGEN

Ratschenverlängerungen für Drehmomentratsche.



UND WENN DIE EXPLANTATION MEHR ALS 200 Ncm ERFORDERT?

Das zirkuläre Entfernen von nur 3 bis 5 mm Knochen verringert das maximale Drehmoment auf weniger als die Hälfte, um die Verbindung zwischen Implantat und Knochen zu lösen und gleichzeitig eine erfolgreiche Explantation zu gewährleisten.

TREPANBOHRER

Die Bohrer ermöglichen außergewöhnlich dünne Schnitte und verringern so das Trauma des umliegenden Knochens. Verschiedene Durchmesser gemäß Breite der Implantate.

Nicht im Kit enthalten





BTI Comercial

San Antonio, 15 · 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · SPAIN
Tel: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

B.T.I.

Biotechnology Institute S.L.

Parque Tecnológico de Álava
Leonardo da Vinci ,14
01510 Miñano (Álava) SPAIN
bti.implantes@bti-implant.es

Niederlassungen

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 7231 428060
Fax: +49 7231 4280615
info@bti-implant.de

PORTUGAL

Tel.: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

FRANKREICH

Tel.: (33) 556 18 11 18
info@bti-implant.fr

UK

Tel.: +44 (0) 2039 661873
customerservice@bti-implant.co.uk

ITALIEN

Tel.: (39) 0270605067
info@bti-implant.it

USA

Cell: 610 209 6040
Office: 866 646 4067
info@bti-implant.us

MEXIKO

Tel.: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

www.bti-biotechnologyinstitute.com

HINWEIS: Fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit des Produktes in den verschiedenen Ländern.



BTI APP PRODUKTNEUHEITEN

Version für iPhone / Smartphone

Version für iPad / Tablet (**exklusive Inhalte für Kunden**)