



btì®

Human
Technology

LINEA IMPLANTARE



CORE



Human Technology

CORE

L'essenza delle tue scelte cliniche

Frutto dei più recenti progressi, **la linea CORE - un set di impianti con 6 diversi diametri e diverse lunghezze** - permette di risolvere la maggior parte dei trattamenti implantari richiesti negli studi odontoiatrici.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI



MORFOLOGIA CONICA

Semplifica la procedura chirurgica su qualsiasi tipo di osso grazie al suo apice con grande capacità di avanzamento. Inoltre, permette di raggiungere una stabilità primaria negli alveoli post-estrattivi.

COMPONENTI RIDOTTI

Gli impianti CORE implicano una **riduzione di tempi e costi** allo studio odontoiatrico, richiedendo un **minor numero di frese e un kit chirurgico semplice** per il loro inserimento.

CONNESSIONE E PIATTAFORMA PROTETICA UNIFICATA



Un tetralobo interno con una **emergenza protesica di diametro 3,5 mm, che permette di unificare le componenti protesiche.**

Favoriscono una maggiore stabilità dei tessuti periimplantari, sono anche indicati per la riabilitazione degli spazi interdentali compromessi.



SUPERFICIE UnicCa®



Grazie alle proprietà della **superficie UnicCa®** gli impianti CORE presentano una **migliore stabilità ossea e una maggiore osteointegrazione.**

CONCETTO BIOBLOCK®



CORE incorpora **BioBlock®**, un concetto biomeccanico per garantire **una sigillatura ermetica e biologica**, che favorisce la conservazione dell'osso marginale intorno agli impianti.

Usando **transepiteliali allargati**, si ottiene un cambio di piattaforma con profili di emergenza più ampi.

Sequenze consigliate di fresatura

Impianti lunghezza standard (da 8,5 a 15 mm)




 Profondità totale dell'impianto
 6,5 mm di profondità di fresatura
 2-3 mm di profondità di fresatura

Tipo	Hounsfield	FRESA	VELOCITÀ	IRRIGAZIONE
I	1050 - 1400	Fresa iniziale	800 - 1.000 rpm	sì
II	850 - 1000	Frese	50 - 75 rpm	no
III	550 - 800	Fresa taglio frontale	50 - 75 rpm	no
IV	400 - 500			
V	100 - 350			

Impianti corti

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 mm)

Sequenze consigliate di fresatura

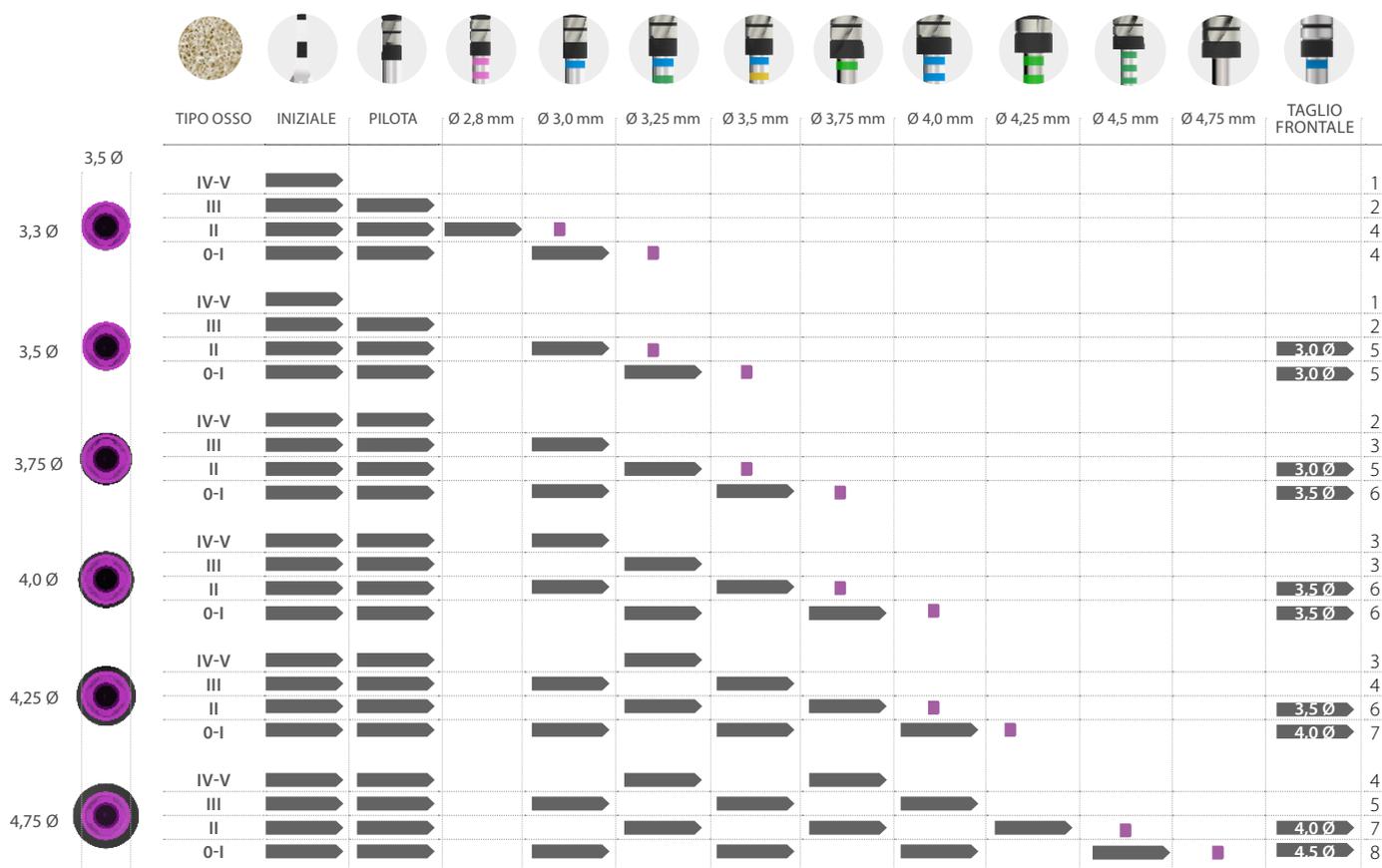

- Profondità totale dell'impianto
- X,X Ø Profondità totale dell'impianto con fresa del diametro specificato
- 2-3 mm di profondità di fresatura

Piattaforma Stretta

IMPIANTO


CORE

Ø3.5 mm diametro della piattaforma



Soluzioni protesiche

degli impianti CORE

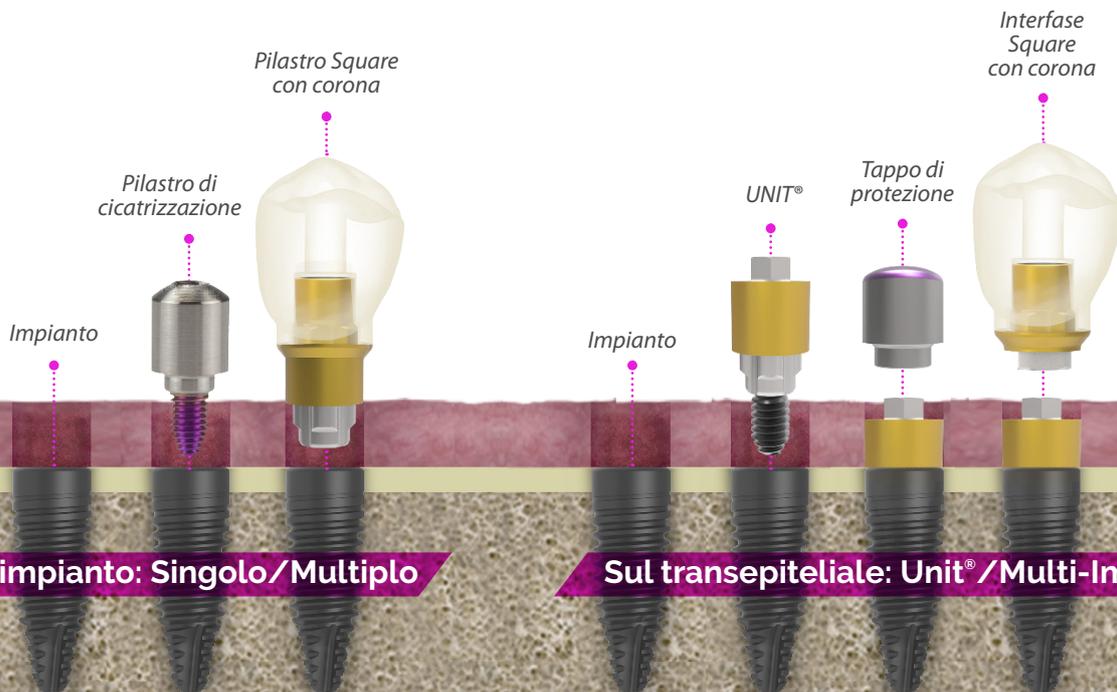

I restauri possono essere eseguiti sia mediante la procedura convenzionale, che con la tecnologia CAD/CAM.

i

4,5



IMPIANTI LUNGHEZZA: 4,5 mm
Riabilitazioni multiple avviate con l'uso di pilastri transepiteliali Multi-Im dedicati. Mai riabilitazioni singole o dirette sull'impianto.



BTI Comercial

San Antonio, 15 - 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · SPAGNA
Tel.: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

Filiali

GERMANIA

Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Germania
Tel.: +49 (0) 7231 428060
Fax: +49 (0) 7231 4280615
info@bti-implant.de

FRANCIA

6 Avenue Neil Armstrong
Immeuble Le Lindbergh
33692 Merignac CEDEX · Francia
Tel.: (33) 5 56 18 11 18
info@bti-implant.fr

ITALIA

C/o Regus Milano Linate
Viale E. Forlanini 23
20134 Milano (MI) · Italia
Tel.: +39 0270605067
info@bti-implant.it

MESSICO

Ejercito Nacional Mexicano 351, 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
Mexico DF · CP 11520 · Messico
Tel.: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

B.T.I.

Biotechnology Institute, S.L.

Parque Tecnológico de Álava
Leonardo da Vinci, 14
01510 Miñano (Álava) Spagna
bti.implantes@bti-implant.es

PORTOGALLO

Praça Mouzinho de Albuquerque, 113, 5º
4100-359 Porto · Portogallo
Tel.: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

Regno Unito

3 Churchill Court, Manor Royal,
Crawley, West Sussex, RH10 9LU
Tel: +44 (0) 2039 661873
customerservice@bti-implant.co.uk

STATI UNITI

1730 Walton Road
Suite 110
Blue Bell, PA 19422-1802 · Stati Uniti
Tel.: (1) 215 646 4067
Fax: (1) 215 646 4066
info@bti-implant.us



CleanImplant
Trusted Quality Mark
2017 - 2021



www.bti-biotechnologyinstitute.es

NOTA: si prega di verificare la disponibilità del prodotto sui vari mercati con il proprio distributore di riferimento.



BTI APP
NOVITÀ PRODOTTO

Versione iPhone / smartphone
Versione iPad/Tablet (**contenuti esclusivi per clienti**)