

LINHA DE IMPLANTES

CORE



Human Technology

CORE

O núcleo das suas decisões clínicas

Resultado dos últimos avanços, a **linha CORE** - *um conjunto de implantes com 6 diâmetros diferentes e vários comprimentos* - permite resolver a grande maioria dos tratamentos implantológicos solicitados nas clínicas dentárias.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS



MORFOLOGIA CÔNICA

Facilita o ato cirúrgico em qualquer tipo de osso graças ao seu ápice com grande capacidade de avanço. Além disso, permite alcançar uma estabilidade primária em alvéolos pós-extração.



CONEXÃO E PLATAFORMA PROTÉTICA COMUM



Um tetralóbulo interno com uma **emergência protética com diâmetro de 3,5 mm** que permite **unificar os aditamentos a utilizar**.

Favorecem uma maior estabilidade dos tecidos peri-implantares, sendo também de eleição para reabilitar espaços interdentários comprometidos.



SUPERFÍCIE UnicCa®




Por meio das propriedades da **superfície UnicCa®**, os implantes CORE apresentam uma **melhor estabilidade óssea e uma maior osteointegração**.



COMPONENTES REDUZIDOS

Os implantes CORE implicam uma **redução do tempo e dos custos** na prática clínica, requerendo um **menor número de brocas e uma simples caixa cirúrgica** para a sua colocação.

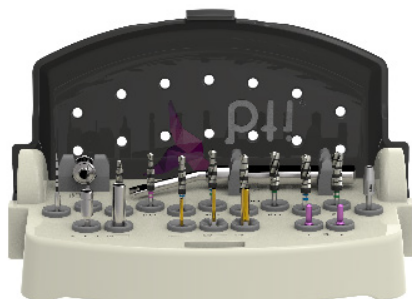

CONCEITO BIOBLOCK®




O CORE incorpora **BioBlock®**, um conceito biomecânico para garantir **hermetismo e selagem biológica** que favorece a preservação do osso marginal em redor dos implantes.

Utilizando **transepteliais expandidos**, realiza-se mudanças de plataforma com perfis de emergência mais largos.

Protocolo de perfuração
recomendado

Implantes
Standard
(de 8,5 a 15 mm)

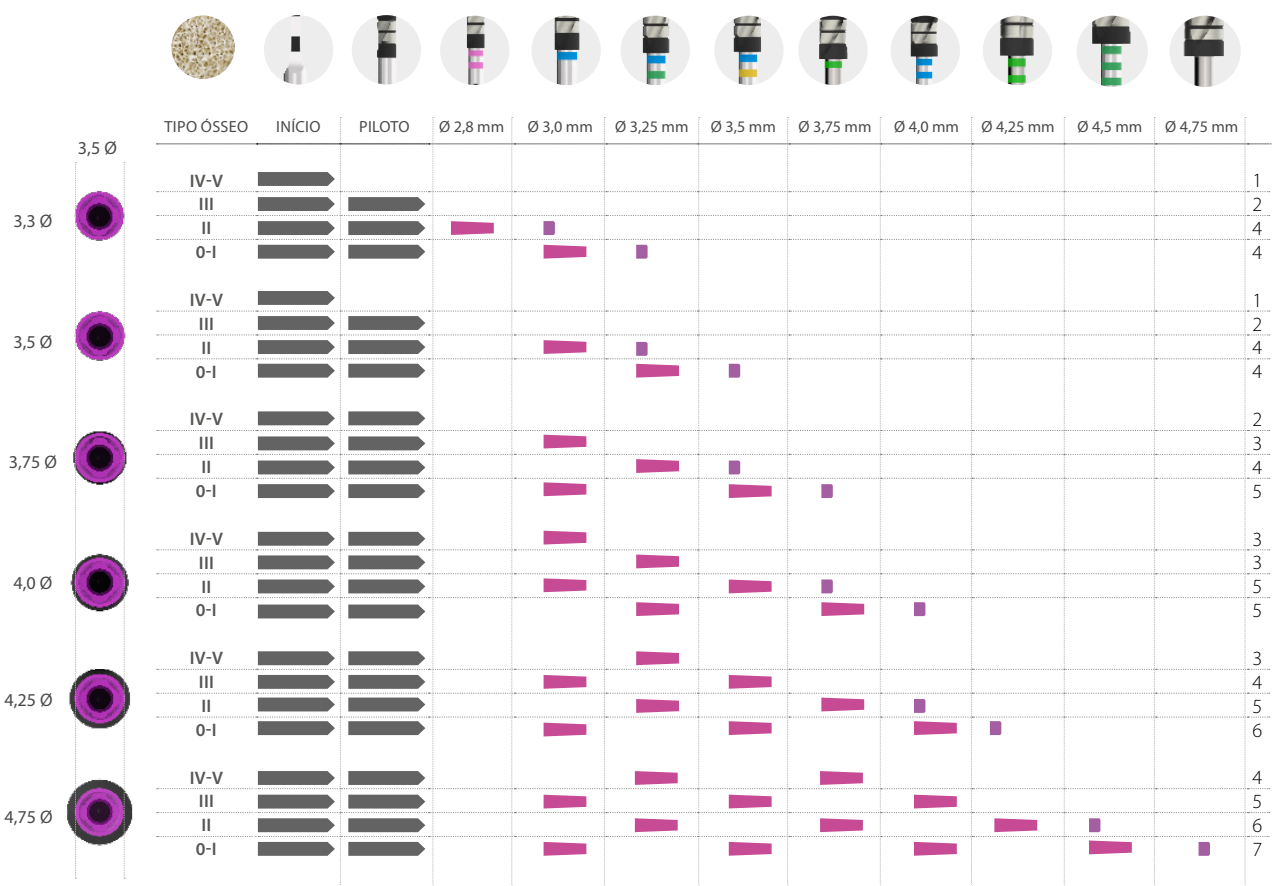

Profundidade total do implante
6,5 mm de profundidade
2-3 mm de profundidade




Tipo	Hounsfield
I	1050 - 1400
II	850 - 1000
III	550 - 800
IV	400 - 500
V	100 - 350

BROCA	VELOCIDADE	IRRIGAÇÃO
Broca de início	800 - 1.000 rpm	sim
Brocas	50 - 75 rpm	não
Broca corte frontal	50 - 75 rpm	não

Implantes Curtos

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 mm)

Protocolo de perfuração recomendado

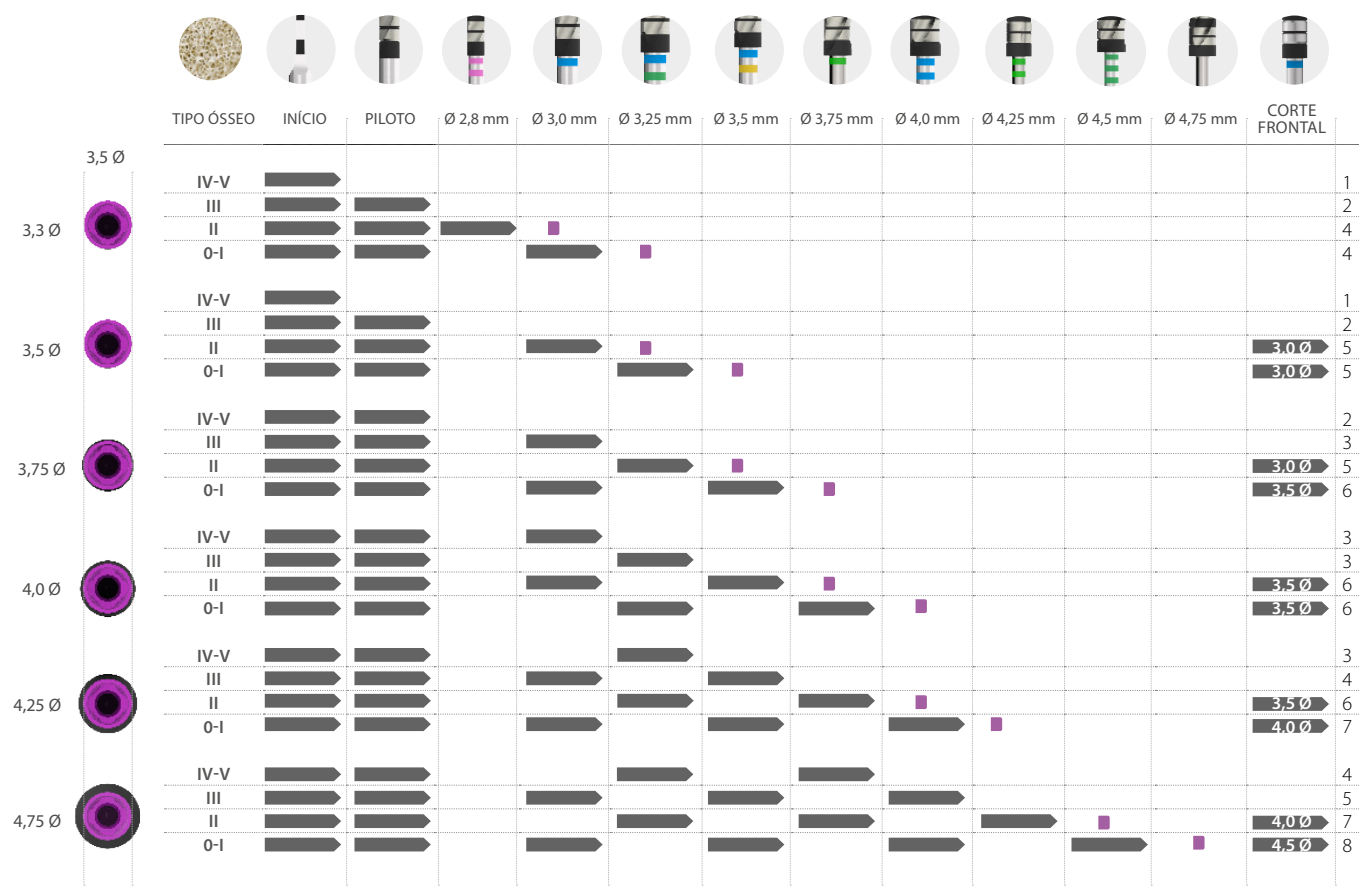

- Profundidade total do implante
- X,X Ø → Profundidade total do implante com a broca de diâmetro especificado
- 2-3 mm de profundidade


Plataforma estreita

IMPLANTE

CORE

Ø3,5 mm de diâmetro da plataforma

Diâmetros

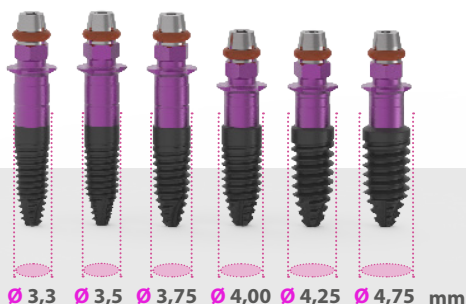


Diferentes comprimentos, segundo o diâmetro,
desde 4,5 mm até 10-13-15 mm



Comprimentos

Restauração protética

dos implantes CORE

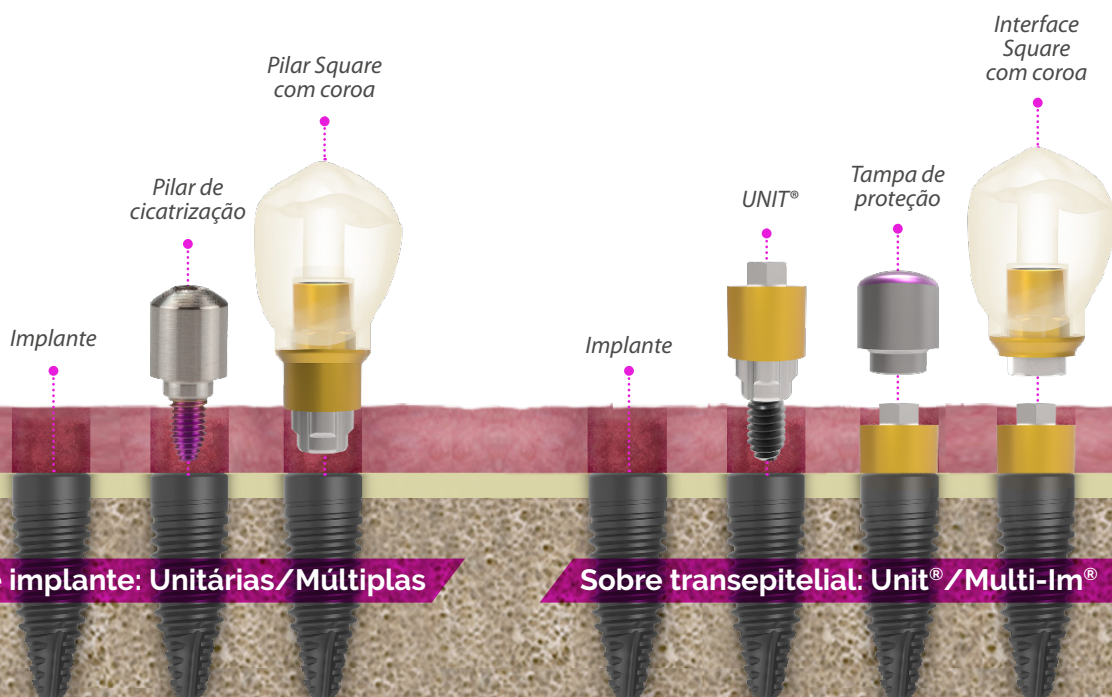

As restaurações podem ser realizadas quer através do procedimento convencional, quer com tecnologia CAD/CAM.

i

4,5



IMPLANTES DE L: 4,5 mm
Restaurações aparafusadas aos Multi-Im específicos. Nunca em restaurações unitárias ou diretas ao implante.



BTI Comercial

San Antonio, 15 - 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · ESPANHA
Tel.: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

Filiais

ALEMANHA

Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Alemanha
Tel.: +49 (0) 7231 428060
Fax: +49 (0) 7231 4280615
info@bti-implant.de

FRANÇA

6 Avenue Neil Armstrong
Immeuble Le Lindbergh
33692 Merignac CEDEX · França
Tel.: (33) 5 56 18 11 18
info@bti-implant.fr

ITALIA

C/o Regus Milano Linate
Viale E. Forlanini 23
20134 Milano (MI) · Itália
Tel.: +39 0270605067
info@bti-implant.it

MÉXICO

Ejército Nacional Mexicano 351, 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
México DF · CP 11520 · México
Tel.: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

B.T.I.

Biotechnology Institute S.L.

Parque Tecnológico de Álava
Leonardo da Vinci, 14
01510 Miñano (Álava), Espanha
bti.implantes@bti-implant.es

PORTUGAL

Praça Mouzinho de Albuquerque, 113, 5.º
4100-359 Porto · Portugal
Tel.: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

UK

3 Churchill Court, Manor Royal,
Crawley, West Sussex, RH10 9LU
Tel: +44 (0) 2039 661873
customerservice@bti-implant.co.uk

USA

1730 Walton Road
Suite 110
Blue Bell, PA 19422-1802 · EUA
Tel.: (1) 215 646 4067
Fax: (1) 215 646 4066
info@bti-implant.us




CleanImplant
Trusted Quality Mark
2017 - 2021



www.bti-biotechnologyinstitute.pt

Nota: consulte a disponibilidade do produto nos diferentes mercados com o seu distribuidor.

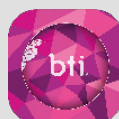

BTI APP
NOVIDADES DE PRODUTO

Versão iPhone / smartphone
Versão iPad / Tablets (**conteúdos exclusivos para clientes**)